

# COMBIHESIVE® INVISICLOSE™ 2S

Predstavljamo

Combihesive® 2S; Vrečka na izpust z InvisiClose™  
upogljivim zapiralom

VEČJA VARNOST



DVOJNO ZAPIRANJE



LAŽJE PRAZNJENJE




ConvaTec



*InvisiClose™ sistem zapiranja vrečke sestavljajo:*

- *varnostni zaklop (A)*
- *zapirali (B)*
- *upogljivo zapiralo repa vrečke (C)*

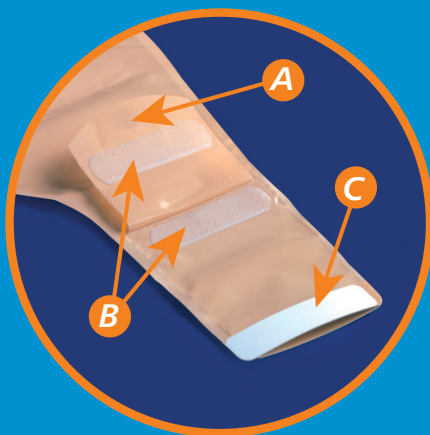

***Katere so poglobitne prednosti in značilnosti Combihesive® 2S; Vrečke na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom?***

- *zapirali omogočata varno zapiranje izpusta vrečke brez uporabe zapiralne sponke*
- *varnostni zaklop zagotavlja dodatno varnost*
- *napreden sistem filtriranja plinov učinkovito preprečuje napihovanje oziroma zlepljanje vrečke*
- *upogljivo zapiralo omogoča lažje praznjenje in/ali čiščenje vrečke*



## ZAPIRANJE VREČKE

- Varnostni zaklop držite pred vrečko tako, da razkrijete zapirali. (1)
- Rep vrečke štirikrat prepognite v smeri proti sebi in se prepričajte, da se zapirali prekrivata. (2)
- Zapirali stisnite skupaj dokler se ne zaskočita (KLIK) po vsej dolžini. (3)
- Varnostni zaklop prepognite proti hrbtni strani vrečke (stran proti telesu) in stisnite zapirali, da začutite, da sta se zaskočili (KLIK). (4)



## PRAZNIJENJE VREČKE

Hrbtno stran vrečke (stran proti telesu) obrnite proti sebi. Previdno dvignite varnostni zaklop, da se odpre. (5)

Varnostni zaklop držite pred vrečko, z dvigom robov odprite zapirali in štirikrat odvijte prepognjen rep vrečke. (6)

Za lažje praznjenje in/ali čiščenje lahko odprete rep vrečke tako, da s palcem in kazalcem stisnete upogljivo zapiralo repa. (7)



## PODATKI ZA NAROČANJE

*Paleta Combihesive® 2S;*

*Vrečk na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom*

<i>Kataloška številka</i>	<i>Ime izdelka</i>	<i>Velikost obročka</i>	<i>Pakiranje</i>
411385	<i>Vrečka na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom, kožne barve</i>	<i>38 mm</i>	<i>10 kom.</i>
411386	<i>Vrečka na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom, kožne barve</i>	<i>45 mm</i>	<i>10 kom.</i>
411387	<i>Vrečka na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom, kožne barve</i>	<i>57 mm</i>	<i>10 kom.</i>
411388	<i>Vrečka na izpust z InvisiClose™ upogljivim zapiralom, kožne barve</i>	<i>70 mm</i>	<i>10 kom.</i>

*vsm*

VALENCIA  
Stoma-Medical d.o.o.

Valencia Stoma-Medical d.o.o.  
Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana  
Tel.: (01) 251 49 59  
Fax: (01) 251 24 90  
[www.vsm.si](http://www.vsm.si)

ConvaTec

