

Zlitje talentov

ADHESIVE
COUPLING
TECHNOLOGY



Diskretnost enodelnega
in mnogostranskost dvodelnega
sistema, prvič združena
skupaj v našem novem
2-v-1 sistemu.

Esteem
synergy™

Najboljše iz obeh svetov

Zlitje talentov v našem edinstvenem 2-v-1 sistemu za oskrbo stome

ESTEEM synergy™ je naš nov pristop k oskrbi stome - uporablja revolucionarno tehnologijo pripenjanja z lepljenjem (Adhesive Coupling Technology)

ESTEEM synergy™ združuje najboljše lastnosti enodelnega in dvodelnega sistema - stomistom ponuja "najboljše iz obeh svetov"

Prednosti enodelnega sistema

Enostavnost

- Enostaven za uporabo
- Zahteva minimalne ročne spretnosti

Diskretnost

- Nizek profil - celo pod oprijetimi oblačili

Udobje

- Upogljiv - z lahkoto se prilaga obliki telesa
- Minimalen pritisk pri nameščanju

Prednosti dvodelnega sistema

Mnogostranskost

- Pestra izbira različnih kožnih podlog in vrečk
- Hitro menjavanje vrečk

Varnost

- Varno pripenjanje z lepljenjem brez uporabe togega obročka za pripenjanje
- Prozorno področje lepljenja omogoča enostavno preverjanje ali je vrečka varno nameščena

Prijaznost do uporabnika

- Koži prijazne kožne podloge
- Manjše število menjavanj podloge in čiščenje kože ter krajši čas priprave

Izboljšana kontrola uhajanja plinov

- Izpopolnjen sistem filtriranja, ki vsrka in nevtralizira široko paleto plinov
- Sistem filtriranja omogoča regulacijo pretoka plinov

Udobje vrečke

- Anatomska oblika omogoča odlično prileganje telesu in svobodo gibanja
- Trpežen, prijeten na otip in mehek material se hitro posuši in je prijeten za nošenje

Esteem
synergy™

Najboljše iz obeh svetov

ESTEEM synergy™

prinaša revolucionarno kombinacijo
udobja in enostavnosti uporabe

Rezultati kliničnega preizkušanja kažejo, da bi večina stomistov prešla na uporabo ESTEEM synergy™

ESTEEM synergy™: Udobje in enostavnost uporabe
Ocene stomistov (n=20)

50 %

udeležencev testiranja
(n=20) bi prešlo
na
ESTEEM synergy™

Olajša nego*	60 %
Varnost na koži	70 %
Varnost področja lepljenja	85 %
Enostavnost nameščanja	85 %
Enostavnost menjavanja	90 %
Upogljivost med nošenjem	95 %
Udobje	100 %

Stomisti so lahko ocenjevali izdelek kot Odličen, Dober, Zadovoljiv ali Slab. Vse ocene v tej razpredelnici so kombinacije ocen Odličen in Dober.
* Ocena dobljena na osnovi izbire med "olajša nego stome" in "ne olajša nege stome".

Varnost in čas nošenja sta bila preizkušena s strogimi laboratorijskimi testi

ESTEEM synergy™ ostane varno nameščen tudi po 8 urah testiranja z utežjo - prenese obremenitev 2 kg, kar je 4x več od običajne obremenitve.

Običajna obremenitev pri uporabi

550 gramov

Obremenitev pri testiranju

2000 gramov (2 kg)

Vrečke napolnjene z mineralnim oljem so ostale varno nameščene tudi po 9-ih dneh testiranja pri ekstremnih pogojih nepretrganega gibanja na "tresočem zidu" pri visoki temperaturi (40°C) in vlažnosti (75% relativne vlažnosti).

Zaradi enostavnega in udobnega nameščanja je ESTEEM synergy™ idealna izbira za postoperativno nego občutljivih stom


- Minimalen pritisk na kožo ob stomi
- Enostavno pregledovanje stome

ESTEEM synergy™ enostaven za uporabo

Sestavni deli sistema ESTEEM synergy™



1. Zaščitni papir kožne podloge
(stran proti telesu)

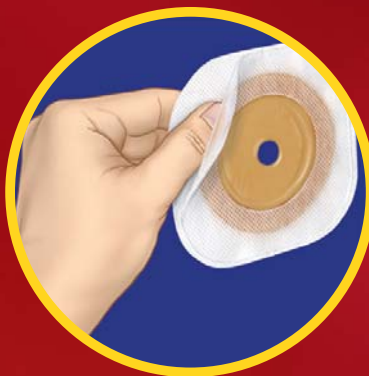

2. Področje lepljenja
(stran proti vrečki)



3. Lepljiv obroč na vrečki

Enostavno nameščanje vrečke:



Metoda 1



Metoda 2

1. Prepričajte se, da sta lepljiv obroč vrečke in področje lepljenja kožne podloge čista in suha.

2. Poravnajte spodnja robova lepljivega obroča vrečke in področja lepljenja. Z uporabo Metode 1 ali Metode 2 namestite vrečko na kožno podlogo.

3. Ko ste prilepili spodnji del, nadaljujte z lepljenjem od spodaj navzgor. S tem postopkom zagotovite, da je stoma v središču in da je celoten lepljiv obroč zalepljen na področje lepljenja.

4. Zgladite stik lepljivega obroča vrečke in področja lepljenja kožne podloge.



Prozorno področje lepljenja olajša odločitev kdaj je potrebno vrečko zamenjati

Prozorno, plastično področje lepljenja omogoča stomistu, da na podlagi opazovanja razbarvanja lepljivega obroča, ugotovi kdaj je potrebno vrečko zamenjati.

Razbarvanje je normalen pojav - in ne pomeni zamakanja in ne vpliva na varnost.



Enostavno menjavanje vrečke

1. Z eno roko primite ušesce na lepljivem obroču vrečke, z drugo pa držite področje lepljenja kožne podloge.

2. Vrečko odlepите od zgoraj navzdol.

Zato, ker ni plastičnega obročka za pripenjanje vrečke, se stomisti z **ESTEEM synergy™** počutijo mnogo udobneje.

Esteem
synergy™

Najboljše iz obeh svetov

Oblikovalna konveksnost pri **ESTEEM synergy™** omogoča boljšo oskrbo stome

Inovativne oblikovalne konveksne kožne podloge omogočajo dodatno mnogostranskost in prilagoditev vsaki obliki stome

Oblikovalna konveksnost omogoča boljše prileganje

- Oblikuje se lahko skladno različnim velikostim in oblikam stom
- Oblikovane so tako, da je onemogočeno zamakanje in s tem tudi draženje kože

Oblikovalna konveksnost je enostavna za uporabo

- Enostavno oblikovanje in gnetenje za čim boljše prileganje
- Rezanje ni potrebno

Oblikovalna konveksnost
je prilagodljiva

- Majhno število velikosti podlog lahko zadovolji vse potrebe in hkrati zmanjša zaloge



Enostavno oblikovanje in gnetenje zagotavlja kar najboljše prileganje

**Stomisti, ki so v preteklosti potrebovali pomoč, bodo lahko z uporabo
ESTEEM synergy™ samostojno oskrbeli svojo stomo.**

Esteem
synergy™

Najboljše iz obeh svetov